



SenseHub[®]

Monteringsguide för Sensehub halstransponder

1. Börja så här. Notera att plastringarnas pilar pekar mot varandra och att änden på remmen har sin spets åt höger.



2. För in plastringarna ända fram till metallspännet och vikten till mitten av remmen. Trä in remmen i plastringen som på bilden.



3. Justera remmen så att innersta hålet hamnar ovanför spännet.



4. För ner plastringen mot vikten så att den låser vikten.



5. Trä remmen som på bilden.



6. Klart.

